


Anleitung zum SARS-Cov-2 Antigen Rapid Test Kit

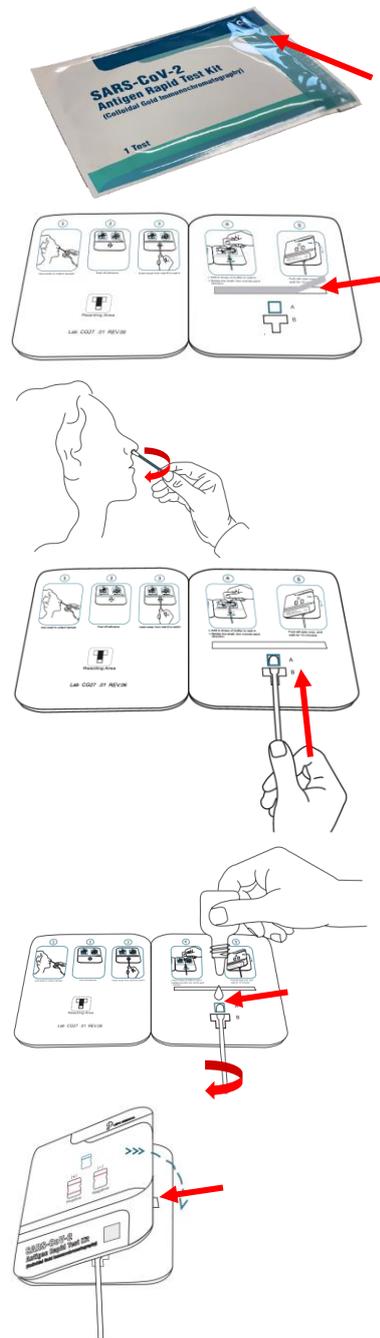


1. Fenster öffnen, um das Klassenzimmer zu **lüften**.
2. Verpackung an der **rechten Kante aufreißen** und Testkarte entnehmen. Das Testkärtchen so **auffalten**, dass es flach am Tisch aufliegt.
3. Die Schutzfolie des **Klebestreifens** auf der rechten Hälfte der Testkarte **entfernen**.
4. Den **Stieltupfer** aus der Verpackung nehmen (nur bei den blauen Pfeilen aufreißen).
5. Die **Maske kurz abnehmen**.
6. Stieltupfer max. 2 cm tief in eine Nasenhöhle einführen, dann **5x im Kreis** drehen, die Nasenhöhle wechseln und **erneut 5x** drehen.
7. Den **Stieltupfer** durch die Öffnung von Vertiefung **B** in die Vertiefung **A** der Testkarte **schieben**.
8. Die **Maske wieder aufsetzen**.
9. Das **Testkärtchen** an den vorderen **Tischrand** legen und danach etwas mit dem Sessel zurückrutschen, damit ein **Mindestabstand** zur Lehrkraft eingehalten werden kann.
10. Die Lehrkraft tropft **6 Tropfen** des Verdünnungsmittels auf den Stieltupfer in **Vertiefung A**.
11. Den Stieltupfer nun **2x in jede Richtung drehen**.
12. Die linke Hälfte der **Testkarte** auf die **rechte Seite klappen**, sodass die beiden Hälften **zusammenkleben**.
13. Die **Uhrzeit** notieren.
14. Das **Testergebnis** wird nach **15 Minuten** angezeigt.

Ergebnisinterpretation

Positiv

(+)

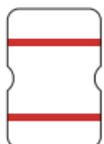

Negativ

(-)



Falsch

